

## Help4skin gojenie ran żel 75 g



Cena: 35,72 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	75 g
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

Help4Skin Gojenie ran to hydrokoloidowy żel bez parabenów wskazany do miejscowej pielęgnacji suchych i wilgotnych ran. Help4skin Gojenie ran to wyrób medyczny, który w sposób pośredni przyspiesza gojenie ran poprzez regulację ich mikrośrodowiska.

Do stosowania w suchych i wilgotnych ranach, takich jak:

- Rany
- Skaleczenia
- Zadrapania
- Otarcia i pęknięcia skóry
- Powierzchowe oparzenia

Można stosować u dzieci powyżej 2 lat.

### Skład

kwaśny koloidalny karbomer, karnozyna, woda, benzoosan sodu, sorbinian potasu.

### Sposób użycia

Zamknięte rany:

- oczyścić i zdezynfekować leczony obszar,
- nałożyć preparat na ranę, nie dotykając jej końcówką aplikatora,
- w razie potrzeby założyć bandaż lub plaster.

Otwarte rany:

- oczyścić i zdezynfekować ranę,
- dokładnie i delikatnie osuszyć sterylną gazą,
- nałożyć grubą warstwę preparatu (0.5-0.75 cm) na ranę, nie dotykając jej końcówką aplikatora,

- założyć plaster lub bandaż,
- zmieniać żel i plaster lub bandaż przynajmniej raz dziennie,
- zmniejszyć ilość stosowanego preparatu, gdy na ranie pojawi się strup.

Uwaga! W przypadku oparzeń - należy najpierw przemyć wodą, następnie przejść do następnych punktów.

Help4Skin Gojenie ran nie jest pierwszym środkiem w przypadku oparzeń! Natychmiast po wystąpieniu oparzenia należy schładzać jego miejsce pod letnią bieżącą wodą przez 20 minut. Należy to zrobić jak najszybciej, gdyż korzystny efekt schładzania oparzonego miejsca zmniejsza się z upływem czasu, a po 30 minutach całkowicie zanika. Aby zapobiec hipotermii, szczególnie w przypadku oparzenia dużej powierzchni ciała, nie zaleca się stosowania zimnej wody. Help4Skin Gojenie ran należy zastosować dopiero w następnej kolejności, po odpowiedniej ocenie stopnia oparzenia. Help4Skin Gojenie ran może być stosowany na powierzchniowe oparzenia naskórka i/lub skóry właściwej, zwykle charakteryzujące się obrzękiem, zaczerwienioną skórą i pęcherzami.

Nie używać w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników. W bardzo rzadkich przypadkach zgłaszano wystąpienie podrażnienia skóry. W przypadku wystąpienia podrażnienia lub reakcji alergicznej należy natychmiast przerwać stosowanie. Nie stosować Help4Skin Gojenie ran na twarz, oczy, powieki oraz błony śluzowe. Należy zawsze zasięgnąć porady lekarza:

- w przypadku dużych, obszernych lub bardzo głębokich ran,
- w przypadku silnie zakażonych ran,
- w przypadku wolnego gojenia się rany lub ryzyka powikłań.

W takich przypadkach Help4Skin Gojenie ran może być pomocny, ale w żadnym wypadku nie wystarcza jako jedyny środek leczniczy.

Do użytku zewnętrznego.

Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności (podanego na opakowaniu).

Przechowywać w temperaturze między 5 a 25 . Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.