

KATAREK Plus Aspirator do odkurzacza

Cena: 45,99 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Postać	aspirator
Producent	DUNA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Co to jest KATAREK Plus aspirator do odkurzacza i w jakim celu się go stosuje?

Aspirator Katarerek Plus podłączany jest do domowego odkurzacza o mocy 800–1800W. Zredukowana, jednostajna siła ssąca sprawia, iż jest on znacznie skuteczniejszy niż ustne aspiratory, które usuwają jedynie ¼ wydzieliny, nie wspominając już o tradycyjnych gruszkach. Dzięki aspiratorowi Katarerek Plus skutecznie i szybko pozbędziesz się wydzieliny z noska malca, przynosząc mu natychmiastową ulgę. Cały proces odciągania wydzieliny jest całkowicie bezpieczny dla każdego dziecka, już od pierwszego dnia życia. Rozkręcana komora aspiratora Katarerek Plus ułatwia utrzymanie aspiratora w czystości, ergonomiczny kształt wpływa na zwiększenie komfortu podczas jego użytkowania, zaś długi wężyk gwarantuje swobodę ruchów.

Katarerek Plus posiada dwie różnokolorowe końcówki pozwalające na stosowanie go u dwójki dzieci jednocześnie. Zastosowany na końcówkach systemem identyfikacji "JA&TY" umożliwia ich rozróżnienie. Aspirator posiada rozkręcaną komorę oraz specjalną szczoteczkę do czyszczenia, co znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.

Produkt dedykowany nie tylko dla małych dzieci. Doskonale sprawdza się również u osób niepełnosprawnych i niewspółpracujących, gdzie wspomaga codzienną ich pielęgnację / opiekę.

Jak stosować KATAREK Plus aspirator do odkurzacza:

Dlaczego oczyszczanie nosa u dzieci jest tak ważne? Dziecko do pierwszego roku życia oddycha niemal wyłącznie przez nos. Jeśli jest zatkany, powoduje to u dziecka rozdrażnienie, utrudnia sen, wpływa na brak apetytu. Jeśli obserwujesz u swojego dziecka takie objawy, prawdopodobnie ma zatkany nos. Co robić w takiej sytuacji? Wraz z lekarzami rekomendujemy zastosowanie Metody 3 Kroków, która kompleksowo dba o małe noski:

Krok 1

ROZRZEDZANIE

Krok ten wykonasz z pomocą roztworu fizjologicznego soli. By ułatwić odciąganie kataru, zakrop do każdej z dziurek nosa po 2-3 krople

soli.

Krok 2

ODCIĄGANIE

Podłącz aspirator do odkurzacza i przyłóż delikatnie końcówkę do każdej z dziurek nosa – naprzemiennie, przytrzymując po 3-4 sekundy z każdej strony. Pamiętaj, by nie przykładać końcówki za mocno.

Krok 3

NAWILŻANIE


Podobnie jak w kroku 1 użyj soli fizjologicznej. Zakrop każdą z dziurek nosa 2-3 kroplami soli. W nawilżonej śluzówce bakterie mają utrudnione namnażanie, a co za tym idzie – nie rozwinie się infekcja.

Aspirator Katarek Plus powinien znaleźć się w wyprawce każdego malucha. Może też stanowić trafiony prezent dla przyszłej mamy.

Pamiętaj, że nieleczony katar u małego dziecka może powodować szereg komplikacji. Do najczęstszych należą zapalenie ucha, oskrzeli, zatok przynosowych a nawet płuc. Jeśli podczas karmienia dziecko ma zatkany nos, może jeść mniej, ponieważ jego uwaga musi skupiać się również na oddychaniu. W takim przypadku dziecko może zacząć tracić na wadze a nawet się odwodnić. Katar nie jest błahostką, pamiętaj o tym!

Sposób użycia aspiratora Katarek Plus:

1. Połącz komorę aspiratora (część B i C) w miejscu nacięcia i przekręć do oporu.
2. Do powstałej komory dołącz końcówkę A.
3. Stożkowy koniec aspiratora (część D) włóż do rury ssącej włączonego odkurzacza (800–1800W).
4. Weź niemowlę na ręce lub posadź dziecko na kolana. Kończycę A przyłóż do otworu nosowego i odciągaj katar 5–10 sekund. Czynność powtórz na drugiej dziurce.
5. Wyłącz odkurzacz i wyczyść aspirator zgodnie ze wskazaniem.

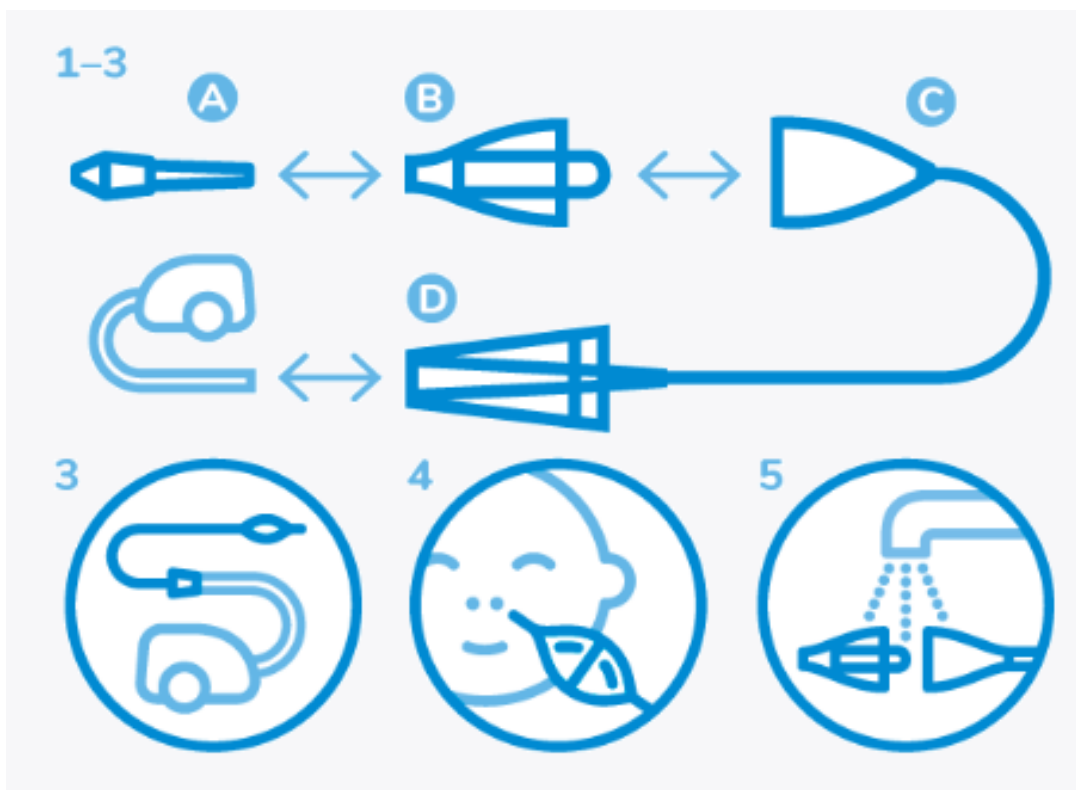

Co zawiera KATAREK Plus aspirator aspirator do odkurzacza:

Skład:

Zawartość pudełka Katarek Plus:

- 1 x Aspirator z rozkręcaną komorą
- 2 x Końcówka z identyfikacją "JA&TY"
- 1 x Szczoteczka z wytrzymałym włosiem

Wymiary:

195 x 101 x 40 mm (pudełko)

Galeria

