

KATAREK Travel 2w1 Aspirator do odkurzacza i ustny

Cena: 47,60 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------|-----------------|
| Opakowanie | 1 sztuka |
| Postać | aspirator |
| Producent | DUNA SP. Z O.O. |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

Co to jest Katarek Travel 2w1 – aspirator do odkurzacza i ustny:

Katar jest powszechny u niemowląt i małych dzieci. Jednym z głównych problemów jest to, że małe dzieci nie potrafią wydmuchiwać nosa, a upływa sporo czasu zanim nauczą się oddychać przez usta. Zablokowany nos utrudnia oddychanie, może powodować dyskomfort i prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych nosa, uszu, gardła i dróg oddechowych. Dlatego utrzymanie nosa w czystości jest tak ważne. Wydzielina w nosie utrudnia oddychanie, powoduje złe samopoczucie, a także dalsze komplikacje: zapalenie uszu, zatok i dolnych dróg oddechowych. Aspirator do nosa KATAREK Travel 2w1 jest najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście nie należy pomijać kontroli lekarskiej, ponieważ tylko lekarz może zdiagnozować przyczynę tych problemów.

Zastosowanie:

Urządzenie służy do usuwania wydzieliny z nosa u dzieci. Nie stosować do innych celów.

Katerek Travel to urządzenie, dzięki któremu skutecznie, szybko i bezpiecznie odciągniesz zalegający w nosku dziecka katar.

To bardzo proste! Zaaplikuj do noska Malucha kilka kropli soli fizjologicznej, która rozrzedzi wydzielinę, a tym samym usprawni aspirację. Podłącz aspirator do rury odkurzacza i uruchom domowe urządzenie. Końcówkę przyłóż na kilka sekund do każdej z dziurek i... gotowe! Wykorzystaj pozostałą w ampułce sól fizjologiczną – ponownie wprowadź kilka kropli do noska, żeby nawilżyć jego błonę śluzową, a tym samym przyspieszyć regenerację.

Końcówki ustnej użyjesz wszędzie tam, gdzie nie podłączysz odkurzacza – w samochodzie, w podróży, na wakacjach, na spacerze. Aspiracja ustna jest skuteczna w przypadku lekkich, wodnistych katarów. Ten sposób jest także dobry do codziennej higienizacji noska dziecka – usuwania z niego drobnych paproszków czy zaschniętych grudek.

Maluch ma czysty, drożny nosek, dzięki któremu swobodnie oddycha, jest spokojny i w końcu może zasnąć czy zjeść bez problemu. Aspirację możesz powtarzać tyle razy w ciągu dnia, ile potrzebujesz.

Katerek Travel to nasza nowość i urządzenie typu 2w1, które umożliwia odciągnięcie dziecku kataru wszędzie tam, gdzie nie możesz

zabrać odkurzacza.

Jeśli:

- nie chcesz zrezygnować ze spacerów na świeżym powietrzu nawet gdy maluch ma lekki katar
- często podróżujesz samochodem, pociągiem czy komunikacją miejską
- nie chcesz zrezygnować ze spotkania z przyjaciółką czy wizyty u dziadków pomimo lekkiego kataru malucha
- planujesz wakacje i czeka Cię długa podróż

Katarek Travel 2w1 będzie doskonałym wyborem!

Gdy nie masz możliwości użycia odkurzacza, możesz w prosty sposób zmienić końcówkę i wykorzystać siłę swoich płuc, by pozbyć się nieprzyjemnej wydzieliny z noska malucha. Katar zbiera się w pojemniczku w komorze aspiratora, którą bez problemu rozkręcisz, by wyczyścić urządzenie.

Pamiętaj jednak, że aspirację ustną powinnaś wykonywać tylko wtedy, gdy nie masz możliwości podłączenia odkurzacza lub w przypadku, gdy katar jest lekki, wodnisty, a zegar wybił akurat drugą w nocy i nie chcesz obudzić domowników czy sąsiadów. Ustny aspirator doskonale spisze się na spacerze lub podczas podróży samochodem, tramwajem, pociągiem czy samolotem.

Planujesz wakacje marzeń? Nie zapomnij o Katarku Travel! W nagłych przypadkach użyjesz końcówki do aspiracji ustnej, a gdy (oby nie!) katar nie odpuści, odkurzacze podłączysz w hotelu. Dodatkowo, Katarek Travel 2w1 zapakowany jest do pojemnej i poręcznej kosmetyczki podróżnej. Możesz do niej wsadzić również kilka ampułek soli fizjologicznej czy maść nawilżającą do nosa i paczkę chusteczek higienicznych!

Ustna wersja aspiratora spisze się genialnie również podczas codziennej pielęgnacji niemowlęcia. Bardzo często w nosku dziecka (zwłaszcza po nocy) znajdują się drobne paproszki czy zaschnięte grudki. Teraz możesz szybko i skutecznie jej pozbyć się zanieczyszczeń, dzięki czemu Twój Maluszek będzie mógł swobodnie oddychać.

Pamiętaj – czysty, drożny nosek to doskonałe samopoczucie, zdrowy sen, apetyt i chęć do zabawy!

Po każdej aspiracji wyczyść urządzenie Katarek Ustny pod bieżącą, ciepłą wodą, używając dołączonej do zestawu szczoteczki.

Jak stosować Katarek Travel 2w1 – aspirator do odkurzacza i ustny:

Pierwsze użycie:

Przed użyciem dokładnie opłucz urządzenie gorącą wodą. Nie mocz w detergencie!


Czyszczenie:

Wyczyść urządzenie po każdym użyciu. Natychmiast umyj go w ciepłej wodzie z kranu z detergentem przyjaznym dla dziecka. Opłucz gorącą lub ciepłą wodą. Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię aspiratora miękką ściereczką lub wacikami nasączonymi alkoholem etylowym klasy farmaceutycznej.

Nie używaj żadnych innych detergentów, środków chemicznych ani materiałów ściernych.


Sposób użycia aspiratora podłączanego do odkurzacza

1. Do komory B dołącz końcówkę A.
2. Wąski koniec aspiratora (część C) włóż do łącznika (część D). Stożkowy koniec aspiratora (część C) włóż do rury ssącej włączonego odkurzacza (800–1800 W).
3. Weź niemowlę na ręce lub posadź dziecko na kolana. Końcówkę A przyłóż do otworu nosowego na kilka sekund i odciągaj wydzielinę. Czynność powtórz na drugiej dziurce.
4. Wyłącz odkurzacze i wyczyść aspirator zgodnie ze wskazaniami.

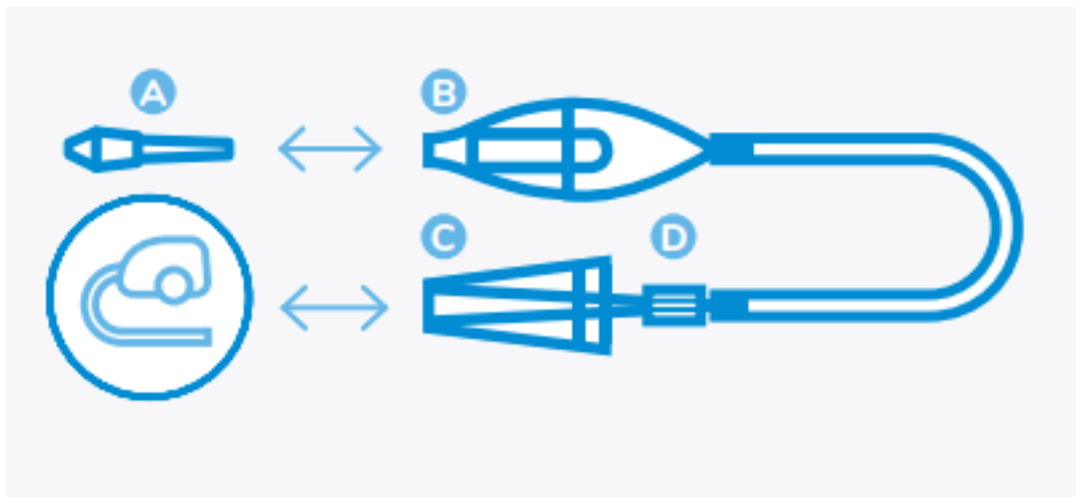

Sposób użycia aspiratora ustnego

1. Do komory B dołącz końcówkę A.
2. Do łącznika (część D) włóż ustnik (część E).
3. Weź niemowlę na ręce lub posadź na kolanach. Końcówkę A przyłóż do otworu nosowego, weź ustnik do ust i odciągaj wydzielinę. Czynność powtórz na drugiej dziurce.
4. Po oczyszczeniu noska wyczyść aspirator zgodnie ze wskazaniem.

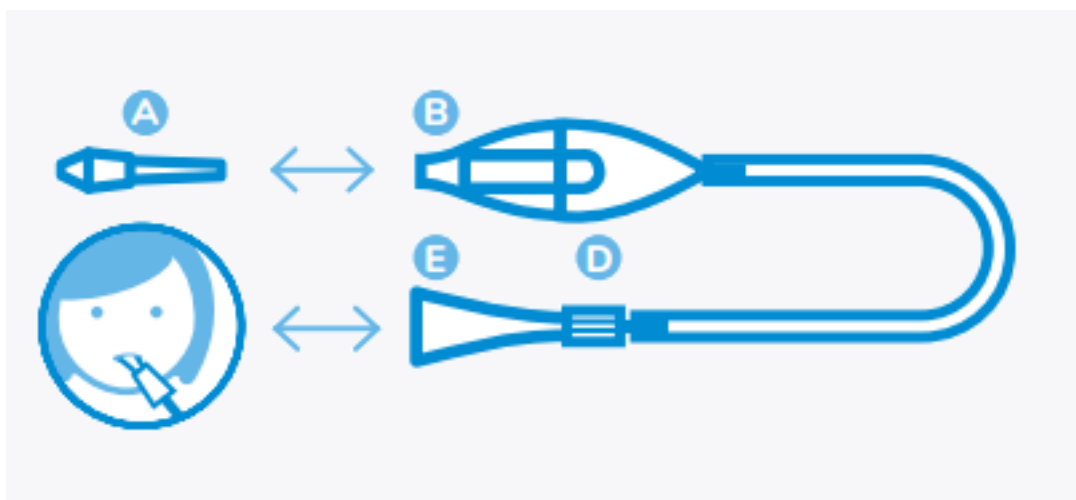

Użytkowanie:

1. Urządzenie można efektywnie użytkować w naturalnej postawie ciała. Sugeruje się, aby osoba dorosła korzystająca z urządzenia trzymała dziecko w ramionach lub na kolanach.
2. Umieść końcówkę A w taki sposób, aby całkowicie zablokowała jedno nozdrze i przytrzymaj ją przez kilka sekund, monitorując wydobywanie śluzu.
3. Powtórz poprzednie kroki na tym samym lub drugim nozdrzu.
4. Aby przyspieszyć proces, można ostrożnie przechodzić między krokami 2 i 3 (pomiędzy nozdrzami)
5. Czas odciągania wynosi około 5 sekund na nozdrze.
6. Po zakończeniu wyłącz odkurzacz i wyczyść urządzenie zgodnie z powyższym opisem.
7. Powtarzaj codziennie 2-3 razy lub tyle razy, ile jest to konieczne.

Żywotność urządzenia wynosi 3 lata. Bezpieczny w użyciu, pod warunkiem postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.

Demontaż i czyszczenie:

1. Wyłącz odkurzacz bezpośrednio po aspiracji.
2. Odłącz stożkowy koniec aspiratora C od odkurzacza
3. Wymyj część A i B . pod gorącą, bieżącą wodą i wyczyść zgodnie z powyższym opisem.
4. Pozostaw do wyschnięcia.



Ostrzeżenia i ważne informacje:

W przypadku hemofilii lub częstego krwawienia z nosa należy poprosić o poradę medyczną. Jeśli po użyciu w okolicach noska dziecka zauważysz alergiczną wysypkę lub zaczerwienienie, przestań korzystać z urządzenia. Poproś o pomoc medyczną.

Gdy jest stosowany u kilku dzieci, zaleca się stosowanie osobnych końcówek dla każdego dziecka i przechowywanie ich podpisanych. Jeśli nie jest to możliwe, dokładnie wyczyść końcówkę przed każdym użyciem, tak jak opisano powyżej.

- Używaj odkurzacza o zakresie mocy 800–1800 W (bezpieczne użytkowanie potwierdzone jest testami.) Zapoznaj się z instrukcją obsługi odkurzacza.
- Aspirator do nosa i odkurzacz nie są zabawką dla dzieci. Katerek Travel musi być używany przez osobę dorosłą po przeczytaniu instrukcji.
- Używaj urządzenia tylko w wyznaczonym obszarze zastosowania.
- Nie używaj urządzenia, jeśli którykolwiek z jego elementów jest uszkodzony lub go brakuje.
- Wyczyść końcówkę aspiratora (A) miękką ściereczką lub wacikami nasączonymi alkoholem etylowym klasy farmaceutycznej. Nie używaj innych chemikaliów.

Co zawiera Katerek Travel 2w1 – aspirator do odkurzacza i ustny:

Skład:

W zestawie Katerek Travel 2w1 znajdziesz:

- aspirator kataru z rozkręcaną komorą i szczoteczkę
- 2 końcówki do noska
- Końcówkę do odkurzacza
- Końcówkę do aspiracji ustnej
- Kosmetyczkę podróżną – opakowanie

Jak przechowywać Katarek Travel 2w1 – aspirator do odkurzacza i ustny:

Przechowywanie:

Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym otoczeniu, z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego i promieniowania ciepłego