

Protefix Extra mocny krem mocujący do protez zębowych, 40 ml



Cena: 11,50 zł

Opis słownikowy

Marka	Protefix
Opakowanie	47 g
Postać	krem
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Czyszczenie protezy i jamy ustnej:

- Wypłukać jamę ustną wodą. Delikatnie poruszyć protezę i wyjąć.
- Jeśli na protezie lub w jamie ustnej pozostają resztki kremu, należy je usunąć za pomocą wacika zwilżonego ciepłą wodą lub olejem jadalnym.
- Delikatnie oczyścić dziąsła i podniebienie przy pomocy miękkiej szczoteczki .
- Protezę oczyścić z resztek jedzenia przy pomocy miękkiej szczoteczki do zębów i Pasty Protefix® HIGIENA. Dokładnie opłukać pod bieżącą wodą.

Sposób użycia:

Sposób stosowania kremu:

- Krem mocujący nałożyć na oczyszczoną, wilgotną lub suchą protezę.
- Nakładać małą ilość kremu (krótkimi odcinkami), w odstępach jak na rysunku. Potrzeba kilku prób, aby ustalić jaka ilość kremu jest konieczna, a jednocześnie nie wypływa spod protezy.
- Protezę założyć, przycisnąć, a następnie lekko przygryźć. Krem działa natychmiast po zastosowaniu.
- Po otwarciu tubki może pojawić się olej, który stanowi bazę kremu. Należy usunąć nadmiar oleju poprzez wyciśnięcie go z tubki; nie wpływa to na siłę mocującą kleju.
- Po użyciu należy starannie zamknąć tubę, uważając by nie dostała się do niej woda. Wilgoć po dostaniu się do tuby może spowodować stwardnienie kremu mocującego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Krem mocujący nie jest w stanie zastąpić dobrego dopasowania protezy przez lekarza stomatologa lub protetyka. Jeśli stwierdzą Państwo, że krem działa słabiej niż zwykle lub czują jego wyciek w trakcie stosowania – należy skonsultować się ze swoim lekarzem. Mogą to być objawy złego dopasowania protezy.
- Przy ponawiających się stanach zapalnych lub uszkodzeniach błony śluzowej – przed zastosowaniem kremu skonsultować się z dentystą.
- Używanie protezy wymaga regularnej higieny jamy ustnej i samej protezy. W tym celu polecamy czyszczenie protezy Pastą

czyszczącą Protefix® HIGIENA. Raz w tygodniu protezę należy zdezynfekować przy pomocy Tabletek czyszczących Protefix® HIGIENA.

- Zwykle proteza daje się łatwo wyjąć w celu oczyszczenia; w razie potrzeby należy starannie przepłukać jamę ustną ciepłą wodą a następnie obłuzować protezę.
- Długość efektu mocującego zależy od wielu czynników, w tym spożywanych pokarmów (np. gorących napojów), stanu błony śluzowej i dopasowania protezy.
- Podczas prawidłowego użytkowania kremu może naturalnie dochodzić do połykania niewielkich ilości kremu, co nie jest szkodliwe dla organizmu.
- Przy podanym sposobie używania krem można stosować długotrwale.

Skład:

Mieszanina soli sodowych i wapniowych kopolimeru eteru metylowinyloвого i bezwodnika kwasu maleinowego, karboksymetyloceluloza, parafina, wazelina, koloidalny dwutlenek krzemu, mentol, azorubina, benzoesan metylu