

# Protefix Krem mocujący hypoalergiczny, 40 ml

Cena: 15,50 zł

## Opis słownikowy



|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Marka       | Protefix                   |
| Opakowanie  | 47 g                       |
| Postać      | krem                       |
| Producent   | QUEISSER PHARMA GMBH & CO. |
| Rejestracja | Wyrób medyczny             |

## Opis produktu

Protefix Krem mocujący hypoalergiczny nie zawiera konserwantów, barwników ani substancji aromatycznych. Mogą go więc stosować osoby szczególnie podatne na reakcje uczuleniowe ponieważ zmniejsza ryzyko reakcji alergicznej. Jednocześnie zachowuje wszystkie właściwości mocujące oryginalnego kremu Protefix.

### Sposób użycia:

- Krem mocujący nałożyć na oczyszczoną, wilgotną lub suchą protezę.
- Nakładać małą ilość kremu (krótkimi odcinkami), w odstępach. Potrzeba kilku prób, aby ustalić jaka ilość kremu jest konieczna, a jednocześnie nie wypływa spod protezy.
- Protezę założyć, przycisnąć, a następnie lekko przygryźć. Krem działa natychmiast po zastosowaniu.
- Po otwarciu tubki może pojawić się olej, który stanowi bazę kremu. Należy usunąć nadmiar oleju poprzez wyciśnięcie go z tubki; nie wpływa to na siłę mocującą kleju.
- Po użyciu należy starannie zamknąć tubę, uważając by nie dostała się do niej woda. Wilgoć po dostaniu się do tuby może spowodować stwardnienie kremu mocującego.

### Skład:

Mieszanina soli Na i Ca kopolimeru eteru metylowinylowego i bezwodnika kwasu maleinowego, karboksymetyloceluloza, parafina, wazelina, koloidalny dwutlenek krzemu.