

Protefix Podściółki mocujące do protez zębowych dla szczęki, 30 sztuk



Cena: 20,99 zł

Opis słownikowy

Marka	Protefix
Opakowanie	30 sztuk
Postać	Podściółki mocujące
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu.

Możliwe działania niepożądane:

W pojedynczych przypadkach niewykluczone są reakcje alergiczne śluzówki jamy ustnej lub całego organizmu. W przypadku zaistnienia podejrzenia alergii prosimy skonsultować się z lekarzem stomatologiem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Podściółki przeznaczone są tylko do protez całkowitych. Nie stosować przy protezach częściowych. Dla zapewnienia odpowiedniego dopasowania protezy – zaleca się regularne wizyty u stomatologa. Przy ponawiających się stanach zapalnych lub poczuciu, że proteza słabiej się trzyma – skonsultować się z lekarzem. Podściółki mocujące Protefix® należy zmieniać co najmniej raz dziennie i dbać o higienę jamy ustnej i protezy. Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie używać po upływie terminu ważności.

Sposób użycia:

1. Sprawdzić wielkość protezy: przy małych protezach należy przyciąć podściółkę odpowiednio nożyczkami wzdłuż jej prostego brzegu.
2. Podściółkę zwilżyć zanurzając ją na ok. 10 sekund w letniej wodzie po czym wyjąć i pozwolić wodzie obcieknąć.
3. Podściółkę nałożyć dowolną stroną na zwilżoną protezę. Tylne 2 mm protezy musi pozostać nieprzykryte.
4. Podściółkę docisnąć zaczynając od środka w kierunku obrzeży aż będzie w każdym miejscu gładko przylegała.

Skład:

Alginian sodowy, włókna wiskozowo-polipropylenowe.