

Protefix Podściółki mocujące do protez zębowych dla żuchwy, 30 sztuk

Cena: 21,36 zł



Opis słownikowy

Marka	Protefix
Opakowanie	30 sztuk
Postać	Podściółki mocujące
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu.

Możliwe działania niepożądane:

W pojedynczych przypadkach niewykluczone są reakcje alergiczne śluzówki jamy ustnej lub całego organizmu. W przypadku zaistnienia podejrzenia alergii prosimy skonsultować się z lekarzem stomatologiem.

Sposób użycia:

1. Przy małych protezach przyciąć podściółkę mocującą do odpowiedniej wielkości. Podściółkę zwilżyć i nałożyć jak opisano w sposobie użycia dla protezy szczęki.
2. Podściółkę docisnąć palcem do zagłębienia żuchwowego protezy (zaczynając od środka), aż będzie w każdym miejscu gładko przylegała. Wskazówka: w przypadku zmniejszenia przyczepności wyjąć protezę; posypać podściółkę proszkiem mocującym Protefix®.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Podściółki przeznaczone są tylko do protez całkowitych. Nie stosować przy protezach częściowych. Dla zapewnienia odpowiedniego dopasowania protezy – zaleca się regularne wizyty u stomatologa. Przy ponawiających się stanach zapalnych lub poczuciu, że proteza słabiej się trzyma – skonsultować się z lekarzem. Podściółki mocujące Protefix® należy zmieniać co najmniej raz dziennie i dbać o higienę jamy ustnej i protezy. Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie używać po upływie terminu ważności.

Skład:

Alginian sodowy, włókna wiskozowo-polipropylenowe.