

## SutriSept Hydrożel na rany, 30 ml



Cena: 35,96 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	30 ml
Postać	żel
Producent	VERCO
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Poliheksanid, Poloksamer

### Opis produktu

SutriSept Hydrożel na rany to produkt stosowany do mechanicznego oczyszczania, odkażania i nawilżania ran przewlekłych i zakażonych oraz oparzeń pierwszego i drugiego stopnia.

Przy braku chorób ogólnoustrojowych wszystkie rany goją się samoistnie, pod warunkiem, że są czyste i mają zapewniony odpowiedni poziom wilgotności. Jednak kontakt z powietrzem, zanieczyszczenie i wysychanie rany powodują wzrost różnych drobnoustrojów. W konsekwencji rany ostre mogą stać się przewlekłymi. SutriSept Hydrożel na rany oczyszcza, nawilża i izoluje powierzchnię rany od otoczenia zewnętrznego tworząc warstwę ochronną. Wypełnia przestrzeń między opatrunkiem a powierzchnią rany i pomaga skrócić proces gojenia, utrzymując stabilne środowisko w ranie.

Jedyne połączenie Poliheksanidu 0,1% (PHMB) i Poloksameru 188 (1%).

SutriSept Hydrożel na rany to żel do oczyszczania, nawilżania i pielęgnacji ran ostrych i przewlekłych, jak również oparzeń 1. i 2. stopnia, stosowany w połączeniu z materiałami medycznymi, takimi jak bandaże, opatrunki, podkłádki i wypełniacze ran. Przewlekłe rany skóry na ogół pokryte są strupami i obumarłymi (martwiczymi) tkankami. Warstwy te są trudne do usunięcia i opóźniają proces gojenia się rany. Dlatego ważne jest regularne oczyszczanie rany. SutriSept Hydrożel na rany tworzy w miejscu nałożenia warstwę ochronną i mechanicznie zapobiega przyleganiu mikroorganizmów do obszaru rany.

SutriSept Hydrożel na rany nie wpływa na opóźnienie procesu gojenia się rany, dzięki czemu może być nałożony na dno rany na okres kilku dni. W tym czasie zapewnia odkażanie poprzez regularne oczyszczanie, nawilżanie i wytworzenie warstwy ochronnej na ranie. Rany ostre powstałe w wyniku wypadku są na ogół zanieczyszczone przez czynniki mogące opóźnić proces gojenia się rany, takie jak ciała obce, wykwyty i obumarłe (martwicze) tkanki. Dlatego też w przypadku ran ostrych bardzo ważne jest utrzymywanie czystości i wilgotności łóżyska rany i jej okolic.

Ponadto rany otwarte stanowią odpowiednią powierzchnię do osiedlania się drobnoustrojów. SutriSept Hydrożel na rany tworzy cienką powłokę w miej

#### Działanie:

SutriSept Hydrożel na rany tworzy w miejscu nałożenia warstwę ochronną i mechanicznie zapobiega przyleganiu mikroorganizmów do obszaru rany. Nie wpływa na opóźnienie procesu gojenia się rany, dzięki czemu może być nałożony na dno rany na okres kilku dni. W tym czasie zapewnia odkażanie poprzez regularne oczyszczanie, nawilżanie i wytworzenie warstwy ochronnej na ranie.

Dzięki unikalnemu połączeniu składników (poliheksanid i poloksamer) zapobiega przyleganiu drobnoustrojów w tym miejscu, utrzymuje je w czystości i wilgotności oraz przyczynia się do gojenia rany. Ponadto utworzona przez SutriSept Hydrożel na rany cienka warstwa ochronna stanowi barierę pomiędzy powierzchnią rany a opatrunkiem, minimalizuje przywieranie opatrunku do powierzchni rany oraz ogranicza wzrost drobnoustrojów osiedlających się na powierzchni opatrunku.

#### Zastosowanie:

- Oczyszczanie, irygacja i nawilżanie ran ostrych (np. ran urazowych, które powstały w wyniku skaleczeń, rozerwania, zadrapań i otarć, zgnieceń, ugryzień, ukąszeń itp. w tym także ran chirurgicznych),
- ran przewlekłych (np. owrzodzeń cukrzycowych, owrzodzeń żylnych, odleżyn itp.),
- ran powstałych w wyniku działania czynników termicznych lub chemicznych (np. oparzeń 1. i 2. stopnia, oparzeń chemicznych itp.),
- ran powstałych w wyniku porażenia prądem elektrycznym,
- ran powstałych od oparzeń radiacyjnych,
- miejsc wprowadzenia cewników urologicznych,
- skóry w okolicach stomii, przetoki, ropni.

SutriSept Hydrożel na rany może być używany także:

- Nawilżanie materiałów medycznych takich jak bandaże, opatrunki, kompresy i wypełniacze ran przed ich nałożeniem,
- nawilżanie i odkażanie materiałów medycznych, takich jak bandaże, opatrunki, kompresy i wypełniacze ran, które wyschły, przywały do powierzchni rany i uległy zanieczyszczeniu, przed ich usunięciem z rany.

#### Zalety produktu:

- Utrzymuje czystość i odpowiednią wilgotność rany,
- Zapobiega zakażeniu rany i przyspiesza jej gojenie,
- Bezboleśnie oczyszcza rany i oparzenia,
- Kompatybilny ze wszystkimi opatrunkami na rany,
- Bezpieczeństwo długotrwałego stosowania,
- Innowacyjna opatentowana formuła,
- umożliwienie oceny wyglądu rany w trakcie procesu gojenia (przezroczysty, bezbarwny, bezzapachowy żel).

#### Przeciwwskazania:

Nie należy stosować SutriSept Hydrożel na rany w następujących przypadkach:

1. Produkt nie jest odpowiedni do stosowania na chrząstkę szklaną i przy aseptycznych chirurgicznych zabiegach stawów, w uchu środkowym i wewnętrznym oraz w oku. Jeśli SutriSept Hydrożel na rany wszedł w kontakt z aseptyczną chrząstką, należy ją natychmiast przemyć roztworem Ringera lub roztworem soli fizjologicznej.
2. Nie stosować jeśli u pacjenta stwierdzono lub podejrzewa się nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu (poliheksanid).
3. Nie stosować w obrębie ośrodkowego układu nerwowego i opon mózgowych.
4. Nie stosować razem z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi, mydłami, kremami, olejami, enzymami itp. Przed zastosowaniem produktu substancje te należy całkowicie usunąć z powierzchni rany.

#### Sposób użycia:

- Przed założeniem opatrunku:

Całą ranę i jej okolicę należy dokładnie oczyścić przy użyciu SutriSept Płyn na rany w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia zanieczyszczeń i drobnoustrojów na powierzchnię rany. Przed założeniem opatrunku i bandaża łożysko rany należy pokryć dużą ilością produktu SutriSept Hydrożel na rany.

SutriSept Hydrożel na rany może pozostawać na powierzchni rany aż do następnej zmiany opatrunku. W ten sposób SutriSept Hydrożel na rany utrzymuje powierzchnię rany stale nawilżoną, a tym samym minimalizuje przywieranie do niej opatrunku. Tak oczyszczoną ranę należy potem odpowiednio zabandażować.

Utworzoną przez SutriSept Hydrożel na rany warstwę ochronną pokrywającą powierzchnię rany można łatwo usunąć przy następnej zmianie opatrunku. Do tego celu poleca się użycie SutriSept Płyn na rany podczas zmiany opatrunku.

Aplikację należy regularnie powtarzać w okresie gojenia rany m.in. w celu usunięcia obumarłych tkanek i strupków.

W przypadku ran głębszych i większych, powierzchnię rany najpierw przemywa się produktem SutriSept Płyn na rany, a następnie wypełnia się produktem SutriSept Hydrożel na rany. W przypadku mniejszych ran wystarczy użycie samego produktu SutriSept Płyn na

rany.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

Przed użyciem należy przeczytać instrukcję używania. Wyłącznie do użytku zewnętrznego na skórę. Nie stosować do infuzji ani w iniekcjach. Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na jakąkolwiek substancję zawartą w produkcie. Nie połykać! Trzymać z dala od dzieci. Nie używać tubek, których uszczelka pod nakrętką jest rozdarta lub uszkodzona. Okres przydatności produktu przechowywanego w temperaturze pokojowej poniżej 25°C wynosi 3 (trzy) lata. Po otwarciu opakowania należy zużyć produkt w ciągu 8 (ośmiu) tygodni. Należy zamknąć tubkę natychmiast po użyciu, aby zapobiec zanieczyszczeniu produktu. Otwór tubki należy chronić, aby uniknąć zanieczyszczenia podczas używania. Tubki, które miały bezpośredni kontakt z raną lub zostały zanieczyszczone w inny sposób, należy wyrzucić. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed słońcem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

1. SutriSept Hydrożel na rany jest produktem gotowym do użycia.
2. SutriSept Hydrożel na rany można stosować bezpośrednio na ranę, jak również na bandaże i gazę.
3. Materiałów medycznych takich jak bandaże, gaza, gaziki do przecierania itp. nie należy ponownie używać.
4. SutriSept Hydrożel na rany zawiera substancje konserwujące, okres przydatności do użycia po otwarciu wynosi 8 tygodni.
5. Należy zamknąć tubkę natychmiast po użyciu, aby zapobiec zanieczyszczeniu.
6. Otwór tubki należy chronić, aby uniknąć zanieczyszczenia podczas używania. Tubki, które miały kontakt bezpośrednio z raną lub zostały zanieczyszczone w inny sposób należy wyrzucić.
7. Otwarty produkt należy używać u jednego pacjenta, aby uniknąć ryzyka jakiegokolwiek zanieczyszczenia.

**Skład:**

0,1% PHMB (poliheksanid), 1 % Poloksamer 188

Zgodnie z najnowszymi międzynarodowymi wytycznymi substancją pierwszego rzutu w przypadku oparzeń jest PHMB (poliheksanid)<sup>1</sup>.

**Badania:**

SutriSept Hydrożel na rany przeszedł wszystkie testy biokompatybilności, a także był testowany dermatologicznie. Na podstawie biokompatybilności stwierdzono, że produkt ten nie ma działania drażniącego, jest dobrze tolerowany, nie jest cytotoksyczny i nie powoduje nadwrażliwości. Zaobserwowano, że nie spowalnia ziarninowania ani epitelializacji. SutriSept Hydrożel na rany przeznaczony jest do nawilżania i pielęgnacji ran oraz skóry. Jest to wyrób medyczny klasy III zgodnie z dyrektywami 93/42/EWG i 2007/47/WE dotyczącymi wyrobów medycznych

<sup>1</sup>Kramer A et al. Consensus on Wound Antisepsis: Update 2018, Skin Pharmacol Physiol 2018;31:28–58