

SutriSept Płyn na rany, 50 ml

Cena: 23,33 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	50 ml
Postać	płyn
Producent	VERCO
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Poliheksanid, Poloksamer

Opis produktu

SutriSept Płyn na rany to płyn do oczyszczania, przemywania, nawilżania i pielęgnacji ran ostrych, przewlekłych i zakażonych oraz oparzeń 1. i 2. stopnia. Jest on także odpowiedni do antyseptycznego oczyszczania, zmiękczenia i usuwania wyschniętych i przywierających do rany materiałów opatrunkowych, bez powodowania wtórnego urazu.

Jedynie połączenie Poliheksanidu 0,1% (PHMB) i Poloksameru 188 (1%).

Działanie:

SutriSept Płyn na rany oczyszcza rany mechanicznie. Wchodzące w skład wyrobu środki powierzchniowo czynne (PHMB, Poloksamer 188), poprzez obniżenie napięcia powierzchniowego, zapewniają wygodne i bezbolesne oczyszczanie rany przed jej opatrzeniem. SutriSept Płyn na rany przyczynia się do gojenia się rany zapewniając wysoce pozytywne działanie oczyszczające i nawilżające na powierzchniach, na których jest aplikowany.

Zastosowanie:

SutriSept Płyn na rany jest odpowiedni do stosowania w poniższych wskazaniach:

- Zakażone i niezakażone rany ostre (np. rany urazowe powstałe w wyniku przecięcia, rozdarcia, otarcia, zmiżdżenia, ugryzienia, użądlenia itp., rany chirurgiczne),
- Zakażone i niezakażone rany przewlekłe (np. owrzodzenia stopy cukrzycowej, owrzodzenia żyłne, odleżyny itp.),
- Zakażone i niezakażone rany powstałe w wyniku działania czynników termicznych lub chemicznych (np. oparzenia 1. i 2. stopnia, oparzenia chemiczne itp.),
- Rany spowodowane działaniem prądu elektrycznego,
- Rany popromienne,
- Miejsca wprowadzenia cewników urologicznych,
- Pielęgnacja skóry w okolicy stomii, pielęgnacja przetok i ropni.

SutriSept Płyn na rany odpowiedni jest także:

- Do oczyszczania i pielęgnacji powierzchni rany przed założeniem opatrunku.
- Do antyseptycznego oczyszczania, zmiękczenia i usuwania wyschniętych, zanieczyszczonych i przywierających do rany materiałów opatrunkowych, tj. bandaży, opatrunków, gazików i wypełniaczy ran.

Zalety produktu:

- Utrzymuje czystość i odpowiednią wilgotność rany,
- Zapobiega zakażeniu rany i przyspiesza jej gojenie,
- Bezboleśnie oczyszcza rany i oparzenia,
- Kompatybilny ze wszystkimi opatrunkami na rany,
- Bezpieczeństwo długotrwałego stosowania,
- Dobrze tolerowany przez błony śluzowe
- Innowacyjna opatentowana formuła.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować wyrobu SutriSept® Płyn na rany w następujących przypadkach:

1. SutriSept® nie jest odpowiedni do stosowania na chrząstkę szklistą i w przypadku aseptycznych operacji stawów, w uchu środkowym i wewnętrznym, nie można go aplikować do oczu (w przypadku kontaktu płynu SutriSept® z aseptyczną chrząstką należy ją natychmiast przemyć roztworem Ringera lub fizjologicznym roztworem soli).
2. Jeżeli u pacjenta rozpoznano lub podejrzewa się nadwrażliwość na którykolwiek składnik wyrobu.
3. W obrębie ośrodkowego układu nerwowego i opon mózgowych.
4. Razem z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi, mydłami, kremami, olejkami, enzymami itp. Substancje te należy dokładnie usunąć z powierzchni rany przed zastosowaniem wyrobu.
5. Do płukania i przemywania otrzewnej.
6. Nie stosować w pierwszych czterech miesiącach ciąży. W zależności od oceny korzyści w stosunku do ryzyka stosowanie płynu SutriSept® w późniejszym okresie ciąży należy oceniać zgodnie z zaleceniami lekarza.

Sposób użycia:

- Przed założeniem opatrunku:

Całą ranę i jej okolice należy dokładnie oczyścić stosując SutriSept Płyn na rany w celu zminimalizowania ryzyka przeniesienia zanieczyszczeń i drobnoustrojów na powierzchnię rany.

W celu optymalnego oczyszczenia rany zaleca się moczenie rany głębokiej z rozległą martwicą tkanek przez co najmniej 10-15 minut za pomocą w

pełni namoczonego kompresu (przez nałożenie mokrego opatrunku).

Aplikację można powtarzać stosownie do warunków w ranie bez żadnych ograniczeń czasowych.

Płynu nie należy rozcieńczać!

Oczyszczoną ranę można pokryć wyrobem medycznym SutriSept Hydrożel na rany, a następnie odpowiednio zabandażować.

- Zastosowanie produktu z opatrunkami i bandażami:

Dokładnie namoczyć opatrunki i bandaże przywierające do powierzchni rany stosując SutriSept Płyn na rany, odczekać ok. 5-10 min. aż zmiękną, po czym usunąć

je ostrożnie z rany. Namoczenie materiałów opatrunkowych płynem SutriSept zapobiega ich przywieraniu do powierzchni rany i znacznie ułatwia zmianę opatrunku.

W celu utrzymania wilgotnego środowiska w ranie, opatrunek można zmieniać codziennie, a jeśli to konieczne – nawet kilka razy dziennie.

SutriSept Płyn na rany wykazuje kompatybilność ze wszystkimi nowoczesnymi opatrunkami na rany.

W przypadku ran głębszych i większych, powierzchnię rany najpierw przemywa się produktem SutriSept Płyn na rany, a następnie wypełnia się produktem SutriSept Hydrożel na rany. W przypadku mniejszych ran wystarczy użycie samego produktu SutriSept Płyn na rany.

- Pielęgnacja cewników

Ewentualnych zakażeń można uniknąć regularnie czyszcząc płynem SutriSept® wloty cewników, elastyczne łączniki i ich otoczenie. SutriSept® Płyn na rany należy rozpylić na danym obszarze z niewielkiej odległości i odczekać około 1-5 minut. Składniki płynu SutriSept® są dobrze tolerowane przez błony śluzowe, a ponadto oczyszczają materiał, z którego wytwarzane są cewniki i systemy PEG, nie uszkadzając go. Tak samo jak w przypadku pielęgnacji ran, wyschnięte materiały medyczne można łatwo usunąć po ich namoczeniu płynem SutriSept®

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed użyciem należy przeczytać instrukcję używania. Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję używania.

Wyłącznie do użytku zewnętrznego na skórę.

Wyrobu SutriSept® Płyn na rany nie wolno podawać we wlewach dożylnych ani iniekcjach. Zawiera poliheksametylen biguanidu (poliheksanid, PHMB). Może wywołać reakcję alergiczną. Nie należy stosować wyrobu u pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników. Wyrobu SutriSept® Płyn na rany nie wolno połykać! Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie używać w przypadku rozerwania/uszkodzenia pomy pod zakrętką. Okres ważności wyrobu przechowywanego w temperaturze pokojowej poniżej 25°C wynosi 3 (trzy) lata. Po otwarciu wyrób należy zużyć w ciągu 8 (ośmiu) tygodni. Natychmiast po użyciu zamknąć butelkę w celu uniknięcia zanieczyszczenia roztworu. Brzegi butelki należy odpowiednio chronić przed bezpośrednim kontaktem z raną, aby uniknąć zanieczyszczenia zawartości podczas używania. Butelki, które weszły w bezpośredni kontakt z raną lub zostały zanieczyszczone w inny sposób, należy wyrzucić do odpadów. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed światłem słonecznym. Zutylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami prawa.

Skład:

0,1% PHMB (poliheksanid), 1 % Poloksamer 188

Badania:

SutriSept® Płyn na rany przeszedł wszystkie testy biogodności oraz był testowany dermatologicznie. Wyniki przeprowadzonych testów wykazały, że wyrób nie

ma właściwości drażniących, jest dobrze tolerowany i nie powoduje nadwrażliwości. Nie zaobserwowano zahamowania ziarninowania ani epitelializacji. SutriSept®

Płyn na rany jest wyrobem gotowym do użytku. Nie jest konieczne doświadczenie w stosowaniu wyrobu. Stosować zgodnie z instrukcją używania. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

SutriSept® Płyn na rany to roztwór do oczyszczania, przemywania, nawilżania i pielęgnacji ostrych, przewlekłych i zakażonych ran oraz oparzeń 1. i 2. stopnia. Zawiera substancje konserwujące, czas przydatności do użycia po otwarciu wynosi 8 (osiem) tygodni. SutriSept® Płyn na rany to wyrób medyczny klasy III zgodnie z regułą 4 i 13 załącznika